

FD 370 cleaner

Środek czyszczący do gabinetów



FD 370 cleaner jest bardzo wydajnym koncentratem do czyszczenia odkażonych powierzchni, takich jak podłogi, ściany, wyposażenie gabinetu itp. FD 370 cleaner może być stosowany z praktycznie wszystkimi środkami do dezynfekcji powierzchni, tak że nie istnieje ryzyko osłabienia działania dezynfekcyjnego środków do dezynfekcji zastosowanych wcześniej lub później. FD 370 cleaner czyści intensywnie i wykazuje dużą tolerancję materiałową. Nie występuje przyklepanie lub przebarwienie z powodu reakcji nietolerancji.

Sammensætning: FD 370 cleaner indeholder ikke-ioniserede tensider (5 - 15%), kompleksdannere (< 5%) samt hjælpestoffer i vandig opløsning.

Anvendelse: Anvendelseskoncentrationen udgør, alt efter tilsmudsingsgrad, 1 - 2%. Ved hjælp af den integrerede doseringshjælp (markeringen svarer til 20 ml) doseres fx 80 ml (160 ml), hvorefter der med lunkent vand fyldes op til 8 liter. Gulve og overflader våd-aftørres. Sørg for en ensartet fugtning af de behandlede overflader. FD 370 cleaner anvendes separat i forhold til desinfektionsproceduren og må ikke blandes med desinfektionsmidlet. FD 370 cleaner må ikke blandes med gængse husholdningsrengøringsmidler. Vi anbefaler, at der anvendes en egnet våd-aftørring.

Henvisninger: Gængse husholdningsrengøringsmidler indeholder som regel anioniske tensider, der ikke er forenelige med visse af de stoffer, der anvendes i overflade-desinfektionsmidler. FD 370 cleaner undgår denne ulempe fra tidligere rengøringsmidler, da produktet er specielt udviklet til supplerende rengøring af desinficerede overflader.

Advarsel. Forårsager alvorlig øjenirritation. Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/holderen bortskaffes til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.